

AT52338

**BEDIENUNGSANLEITUNG, ELEKTRISCHER ROLLSTUHL, FÜR DEN
AUSSENBEREICH**



MD

CE

De

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte machen Sie sich sorgfältig mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie die Anleitung vollständig gelesen und verstanden haben. Wenn Sie Warnhinweise, Anweisungen oder Empfehlungen nicht verstehen, wenden Sie sich an Fachpersonal oder an den Verkäufer. So vermeiden Sie Schäden am Produkt sowie mögliche Verletzungen. **ACHTUNG:** Überprüfen Sie vor jeder Verwendung alle Teile auf mögliche Beschädigungen. Kontrollieren Sie vor der ersten Nutzung sorgfältig den technischen Zustand des Produkts und stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig und ordnungsgemäß montiert sind. Achten Sie dabei insbesondere auf Schrauben, Muttern, Nieten sowie weitere Befestigungs- und Konstruktionselemente. Vergewissern Sie sich, dass das Produkt keine Mängel oder Schäden aufweist. Wenn Schäden festgestellt werden oder Teile fehlen, verwenden Sie das Produkt nicht. Für weitere Informationen wenden Sie sich an den Verkäufer.

ZIELGRUPPE DER PATIENTEN: Personen, die an Krankheiten, Funktionsstörungen oder Verletzungen leiden, zu deren Behandlung, Rehabilitation oder Kompensation dieses Produkt bestimmt ist (siehe Abschnitt „Verwendungszweck“ dieser Gebrauchsanweisung). Das Produkt kann eigenständig durch die anwendende Person oder auf Empfehlung einer Ärztin bzw. eines Arztes, einer Therapeutin bzw. eines Therapeuten oder einer anderen fachkundigen Person erworben werden. Sowohl beim eigenständigen Erwerb als auch bei einer Empfehlung durch medizinisches oder fachkundiges Personal sind die verfügbaren Größen und erforderlichen Funktionen sowie Varianten des Produkts, die Indikationen und Kontraindikationen für die Anwendung sowie die vom Hersteller bereitgestellten Informationen zu berücksichtigen.

ZWECKBESTIMMUNG: Ein elektrischer Rollstuhl ist ein Fahrzeug, das konstruktiv für die Fortbewegung von Personen mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen ist. Der Antrieb erfolgt durch einen Motor, dessen Konstruktion die Geschwindigkeit auf Gehgeschwindigkeit begrenzt.

INDIKATIONEN

Das Produkt eignet sich für Personen mit:

Schwierigkeiten beim selbstständigen Gehen oder schneller Ermüdung während der Fortbewegung, Erkrankungen des Bewegungsapparates (z. B. Gelenkerkrankungen, Verletzungen oder degenerativen Veränderungen), verminderter Muskelkraft oder Gleichgewichtsstörungen, Zuständen nach Verletzungen oder Operationen, bei denen eine Entlastung der unteren Gliedmaßen erforderlich ist, neurologischen Erkrankungen, die die Gehfähigkeit beeinflussen, altersbedingt eingeschränkter Mobilität.

Der E-Scooter ist für die Verwendung durch eine Person bestimmt, die in der Lage ist, das Produkt selbstständig zu bedienen oder es unter Aufsicht einer Betreuungsperson zu nutzen.

KONTRAINDIKATIONEN

Physische oder mentale Einschränkungen (z. B. Sehbeeinträchtigungen), die eine sichere Handhabung des Produkts unmöglich machen. Fehlende Fähigkeit, das Fahrzeug im Außenbereich sicher zu führen (z. B. mangelnde Orientierung im Fußgänger- oder Straßenverkehr). Unkontrollierte Körperbewegungen (z. B. Zittern oder Spastiken), die die Bedienung erschweren können. Bewusstseinsverlust, Schwindelanfälle oder andere Zustände, die während der Fahrt plötzlich auftreten können. Unfähigkeit, eine stabile Sitzposition einzuhalten. Erhebliche Einschränkungen der Reaktionsfähigkeit oder motorischen Koordination. Nutzung ohne Aufsicht durch Personen, die eine ständige Betreuung benötigen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

VERPFLICHTEND! Machen Sie sich vor der ersten Verwendung gründlich mit dieser Anleitung vertraut und stellen Sie sicher, dass Sie alle Regeln zur Verwendung des Produkts verstehen.

Der elektrische Rollstuhl ist ein Medizinprodukt zur Unterstützung der Mobilität der benutzenden Person. Seine sichere Verwendung erfordert Vorsicht, Konzentration sowie eine an die Umgebungsbedingungen angepasste Fahrweise.

Fahren Sie langsam, bis Sie alle Funktionen und Eigenschaften des Scooters kennengelernt haben.

Bewegen Sie sich in überfüllten Bereichen mit reduzierter Geschwindigkeit.

Seien Sie besonders aufmerksam gegenüber Fußgängern und Hindernissen.

Verwenden Sie den Scooter ausschließlich gemäß den geltenden lokalen Vorschriften.

VERBOTEN! Bringen Sie Hände oder Füße nicht in die Nähe beweglicher Teile (z. B. Räder oder Mechanismen). Halten Sie während der Fahrt die Hände von Reifen und Rädern fern. Beachten Sie, dass lose Kleidungsstücke von Reifen und Rädern eingezogen werden können.

WARNHINWEISE ZUR VERWENDUNG

Überschreiten Sie nicht die maximal zulässige Belastung von 130 kg (benutzende Person + Gepäck).

Der Scooter ist ausschließlich für eine Person bestimmt. Transportieren Sie keine weiteren Personen, einschließlich Kinder.

Verwenden Sie den Scooter nicht auf Treppen oder Rolltreppen.

Überwinden Sie keine Hindernisse, die höher sind als in der Spezifikation angegeben, und fahren Sie Hindernisse immer frontal an.

Verwenden Sie den Scooter nicht bei starkem Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder extremen Temperaturen.

Oberflächen des Scooters können sich erwärmen – seien Sie vorsichtig.

SICHERHEIT WÄHREND DER FAHRT

Passen Sie die Geschwindigkeit stets den Fahrbahn- und Umgebungsbedingungen an. Achten Sie besonders auf Fußgänger und passen Sie Ihre Fahrweise entsprechend an. Bewegen Sie sich in überfüllten Bereichen stets mit reduzierter Geschwindigkeit.

Verringern Sie vor dem Abbiegen die Geschwindigkeit – zu schnelles Abbiegen kann zum Umkippen des Fahrzeugs führen.

Behalten Sie während der Fahrt eine stabile Körperhaltung bei.

Vermeiden Sie plötzliche Manöver sowie abruptes Bremsen.

WARNUNG! Beugen Sie sich nicht übermäßig nach vorne oder zur Seite – dies kann zum Verlust des Gleichgewichts und zum Umkippen des Scooters führen.

SICHERHEIT AUF STEIGUNGEN UND RAMPEN

Überschreiten Sie nicht die zulässige Neigung.

Fahren Sie nicht quer oder diagonal zu einer Steigung.

Stellen Sie bei der Abfahrt die minimale Geschwindigkeit ein.

Halten Sie bei der Auffahrt eine konstante Geschwindigkeit.

Beim Fahren in überfüllten Bereichen, z. B. in Supermärkten, ist eine niedrige Geschwindigkeit einzuhalten, um den Bremsweg kontrollieren zu können. Beim Abbiegen sollte die Geschwindigkeit 2 km/h nicht überschreiten.
 Der Scooter sollte nicht bei Regen verwendet werden und das Fahren durch Wasser ist zu vermeiden. Falls das Durchfahren notwendig ist, sollte die Wassertiefe 20 mm und die Geschwindigkeit 1 km/h nicht überschreiten.
 Im Ruhezustand (wenn der Scooter nicht verwendet wird) ist die Stromversorgung mit dem Schlüssel auszuschalten und der Schlüssel zu entfernen, um ein versehentliches Einschalten durch Kinder oder Dritte zu verhindern.

KONTROLLE VOR DER VERWENDUNG

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt den Ladezustand des Akkus, die Funktion der Bremsen, die elektrischen Verbindungen, den Zustand der Reifen sowie die ordnungsgemäße Funktion aller Bedienelemente.

Verwenden Sie den Scooter bei Unregelmäßigkeiten nicht und wenden Sie sich an den Service.

WARNUNG AKKUS UND ELEKTRISCHE SICHERHEIT

Vermeiden Sie den Kontakt des Akkus mit Metallgegenständen – dies kann zu einem Kurzschluss oder Stromschlag führen.

Verwenden Sie ausschließlich empfohlene Akkus und Ladegeräte.

Laden Sie den Akku nicht in der Nähe brennbarer Materialien.

Lassen Sie Kinder während des Ladevorgangs nicht in die Nähe des Scooters.

WARNUNG KINDER UND DRITTE

Erlauben Sie Kindern nicht, das Produkt zu bedienen.

Lassen Sie den Scooter in Anwesenheit von Kindern nicht unbeaufsichtigt.

Transportieren Sie keine weiteren Personen. Dies kann zum Verlust der Stabilität des Scooters führen.

WARNUNG MODIFIKATIONEN UND TEILE

Nehmen Sie keine Veränderungen am Scooter vor und verwenden Sie keine nicht originalen Teile oder Zubehörteile.

Heben Sie den Scooter nicht an abnehmbaren Teilen an (z. B. Armlehnen oder Sitz).

WARNUNG NOTSITUATIONEN

Wenn der Scooter nicht ordnungsgemäß anhält, betätigen Sie sofort die Bremse, schalten Sie die Stromversorgung aus und wenden Sie sich an den Service.

Nach einem Unfall oder einer Beschädigung muss der Scooter vor der erneuten Verwendung durch qualifiziertes Fachpersonal überprüft werden.

WARNUNG ELEKTROMAGNETISCHE STÖRUNGEN (EMI/RFI)

Geräte wie Mobiltelefone oder Funkgeräte können unbeabsichtigte Bewegungen des Scooters verursachen.

Verwenden Sie während der Fahrt keine Funkgeräte und vermeiden Sie die Nähe zu starken Signalquellen.

TRANSPORT IM KRAFTFAHRZEUG

Während des Transports sollte der elektrische Scooter ohne benutzende Person im Kofferraum oder Laderaum des Fahrzeugs transportiert werden. Die Akkus sind vorher zu entnehmen und der Scooter ist gegen Verrutschen zu sichern.

Abnehmbare Teile sollten entfernt oder sicher befestigt werden.

WARNUNG:

Setzen Sie sich während des Transports nicht auf den Scooter.

Der Scooter und die Akkus müssen ordnungsgemäß gesichert sein.

Transportieren Sie die Akkus nicht zusammen mit brennbaren Materialien.



BESCHREIBUNG DER KOMPONENTEN

1. Zündschloss (Schlüssel)
2. Gashebel
3. Batterieanzeige
4. Bremshebel
5. Vorwärts-/Rückwärtsschalter
6. Hupe-Taste
7. Wasserdichter Kabelbaum
8. Klappbare Lenksäule
9. Scheinwerfer / Hupe
10. Vorderer Kotflügel
11. Vorderrad
12. Trittfläche
13. Lithium-Akku
14. Rahmen aus Aluminiumlegierung
15. Sitzkissen
16. Rückenlehne
17. Verriegelung (Schloss)
18. Korb
19. Hinterer Kotflügel
20. Reflektor
21. Trommelbremse
22. Kippschutzrad
23. Motor

FALTEN / ENTFALTEN



1. Öffnen Sie den roten Verriegelungshebel, um den Sitz zusammenzuklappen bzw. aufzuklappen.
2. Öffnen Sie die schwarze Sicherung, um die Lenksäule zusammenzuklappen bzw. aufzuklappen.
3. Entfernen Sie vor dem Zusammenklappen den Lithium-Akku.
4. Die klappbare Lenksäule ist höhenverstellbar und kann nach oben und unten eingestellt werden.

BESCHREIBUNG DER ZUBEHÖRTEILE

Wasserdichter Kabelanschluss

Der wasserdichte Stecker und die zugehörige Verbindung sorgen für sichere und zuverlässige elektrische sowie signaltechnische Verbindungen. Sie sind besonders beständig gegen Feuchtigkeit und lassen sich bei Bedarf einfach austauschen.



Elektrischer Steuerschalter

Der elektrische Steuerschalter steuert die Beleuchtung, die Hupe sowie die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt. Die Tasten sind rutschfest, symmetrisch angeordnet und benutzerfreundlich gestaltet. Rote Taste: Vorwärts-/Rückwärtsfahrt. Grüne Taste: Lichtschalter



Bremshebel (schwarz)

Der Bremshebel besteht aus einer Aluminiumlegierung und ist dadurch leicht, korrosionsbeständig und formstabil. In Verbindung mit dem Bremssystem sorgt er für ein schnelles und zuverlässiges Bremsen.



Gashebel (Steuergriff)

Der Gashebel sorgt für eine komfortable Fahrt und eine gute Kontrolle über das Fahrzeug. Der ergonomisch geformte Griff ist an die Hand angepasst und verfügt über eine rutschfeste Oberfläche, die eine präzise Steuerung ermöglicht. Er zeigt Fahrdaten an und ermöglicht Ihnen die laufende Kontrolle der Parameter des E-Scooters.

Zündschloss (Schlüssel)

Position 1: Strom ausgeschaltet

Position 2: Strom eingeschaltet

Position 3: Strom eingeschaltet sowie Beleuchtung aktiviert



LIEFERUMFANG: Elektrischer Rollstuhl, Akku, Ladegerät, Sitzkissen, Korb, Bedienungsanleitung, Werkzeugset

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen im ausgeklappten Zustand (Länge × Breite × Höhe): 1010 × 530 × 790 mm

Abmessungen im zusammengeklappten Zustand (Länge × Breite × Höhe): 820 × 380 × 690 mm

Sitzabmessungen (Breite × Länge × Dicke): 440 × 470 × 20 mm

Sitzhöhe vom Boden: 95 mm

Rückenlehnenhöhe: 350 mm

Motor: 36V 300W (2 bürstenlose Motoren)

Akku: Lithium 36V 6Ah

Ladegerät: 42V 2A

Steuergerät: 36V, 15A (bürstenlos)

Lenker: höhenverstellbar

Geschwindigkeit: ≤ 6 km/h

Bremse: elektronisch und mechanisch

Bremsweg: 1000 mm

Minimaler Wenderadius: ≤ 1200 mm

Bodenfreiheit: 95 mm

Maximale Steigung: ≤ 15°

Statische Stabilität: ≥ 9°, < 15°

Dynamische Stabilität: ≥ 6°, < 10°

Hindernisüberwindung: 30 mm

Beleuchtung: Frontlicht + hinterer Reflektor

Korb: vorne und hinten

Abmessungen des vorderen Korbes: 340 × 260 × 250 mm

Gewicht des vorderen Korbes: 0,8 kg

Maximale Belastung des vorderen Korbes: 25 kg

Abmessungen des hinteren Korbes: 340 × 295 × 150 mm

Gewicht des hinteren Korbes: 1,15 kg

Maximale Belastung des hinteren Korbes: 25 kg

Reichweite: ≤ 10 km

Vorderrad: 6.9" Vollreifen

Hinterrad: 8" Vollreifen

Maximale Belastung: ≤ 130 kg

Nettogewicht: 21,8 kg

Bruttogewicht: 31 kg

MATERIALZUSAMMENSETZUNG

Rahmen: Aluminiumlegierung

Motor: Metall

Akku: Lithium-Batterie

Akkugehäuse: Kunststoff

Ladegerät: Kunststoff

Armlehnen: keine
Sitz: PVC-Bezug + PU-Schaumfüllung
Rückenlehne: PVC-Bezug + PU-Schaumfüllung
Kotflügel: ABS
Vorderkorb: Nylonstoff
Hinterkorb: Stahl
Vorderrad: PU
Hinterrad: Felge aus Aluminiumlegierung
Lenkgriff: PU-Schaum
Kunststoffteile: ABS

ACHTUNG! DIE EINZELNEN PRODUKTABMESSUNGEN KÖNNEN IM BEREICH VON ± 2 CM ABWEICHEN



Dieses Symbol bedeutet das maximale Benutzergewicht.

SICHERHEITSHINWEISE ZUM AKKU

Eine unsachgemäße Verwendung verkürzt die Lebensdauer des Akkus und kann zu Überhitzung, Brand oder sogar Explosion führen. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise daher sorgfältig:

Zerlegen Sie den Akku nicht. Im Inneren befinden sich Bauteile des Schutzsystems – deren Beschädigung kann zu einem Ausfall führen. Es ist strengstens verboten, die positiven und negativen Pole des Akkus kurz zu schließen. Ein Kurzschluss kann Überhitzung, Brand und weitere Gefahren verursachen.

Erhitzen oder verbrennen Sie den Akku nicht. Dies kann zum Schmelzen der Isolierung sowie zu Brand, Explosion oder weiteren Gefahren führen.

Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser ein und verwenden Sie ihn nicht in stark feuchter Umgebung. Wasser kann einen Kurzschluss im Schutzsystem verursachen und zu Überhitzung oder anderen Gefahren führen.

Laden Sie den Akku ausschließlich mit einem für Lithium-Ionen-Akkus geeigneten Ladegerät. Die Verwendung eines ungeeigneten Ladegeräts kann zu unzulässigen chemischen Reaktionen, Überhitzung oder Brand führen.

Es ist verboten, den Akku mit einem Hammer oder anderen harten Gegenständen zu schlagen oder ihn mit scharfen Werkzeugen zu durchtrennen. Ein beschädigter Akku kann einen Kurzschluss und Brand verursachen.

Im Falle einer Beschädigung oder eines Auslaufens des Akkus und eines Kontakts der Flüssigkeit mit den Augen reiben Sie diese nicht. Spülen Sie die Augen sofort mit sauberem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Mischen Sie keine Lithium-Ionen-Akkus unterschiedlicher Hersteller oder unterschiedlicher Kapazität. Dies kann zu Überhitzung, Brand oder anderen Gefahren führen.

Nach dem Gebrauch sollte der Akku innerhalb von 3 Tagen vollständig geladen werden. Bei längerer Nichtverwendung sollte er alle zwei Monate nachgeladen werden, um Schäden zu vermeiden.

Überschreiten Sie nicht die empfohlene Ladezeit von bis zu 10 Stunden, um eine Überhitzung zu vermeiden. Wenn der Akku nach dieser Zeit nicht vollständig geladen ist, brechen Sie den Ladevorgang ab.

Bewahren Sie den Akku außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lagern Sie den Akku nicht in einer Mikrowelle oder unter hohem Druck, da dies eine ernsthafte Gefahr darstellt.

BESEITIGUNG HÄUFIGER STÖRUNGEN

Fehlfunktion des Geschwindigkeitsreglers oder erhebliche Verringerung der maximalen Geschwindigkeit

Ursachen:

Lockere Batteriekabelverbindung

Niedriger Ladezustand des Akkus

Beschädigte Feder des Reglers

Lösungen:

Batteriekabel festziehen

Akku vollständig aufladen

Feder oder Regler austauschen

Ladegerät lädt nicht ordnungsgemäß

Ursachen:

Beschädigtes Netzkabel oder lockere Steckdose

Durchgebrannte Sicherung des Ladegeräts

Abgetrennte Batterieklemmen

Lösungen:

Kabel reparieren oder Verbindung korrigieren

Sicherung durch ein identisches Modell ersetzen

Alle Kabel korrekt anschließen

Ladevorgang funktioniert, aber die Reichweite ist unzureichend

Ursachen:

Zu niedriger Reifendruck oder zu stark eingestellte Bremse

Längere Fahrten mit hoher Geschwindigkeit, Fahrten bergauf, Gegenwind oder häufiges Bremsen

Verschlissener oder beschädigter Akku

Lösungen:

Reifen aufpumpen und Bremse korrekt einstellen

Längere Fahrten mit hoher Geschwindigkeit sowie häufiges Bremsen vermeiden (erhöhter Energieverbrauch bei Steigungen und Gegenwind ist normal)

Akku austauschen oder instand setzen

Der Antriebsmotor funktioniert nicht ordnungsgemäß

Ursachen:

Lockere oder getrennte Kabel (Akku, Motor, Steuerung)

Beschädigter oder verschmutzter Regler

Lösungen:

Alle Kabel überprüfen und erneut anschließen

Regler sauber halten, Verschmutzungen vermeiden

MELDUNG EINES SCHWERWIEGENDEN VORFALLS

Wenn ein mit dem Produkt zusammenhängender schwerwiegender Vorfall auftritt, der

a) zum Tod eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person geführt hat, führen könnte oder hätte führen können, oder

b) zu einer vorübergehenden oder dauerhaften erheblichen Verschlechterung des Gesundheitszustands eines Patienten, Benutzers oder einer anderen Person führt oder führen könnte, oder

c) eine ernste Bedrohung der öffentlichen Gesundheit darstellt, muss dieser Vorfall dem Hersteller sowie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates gemeldet werden, in dem der Benutzer oder Patient seinen Wohnsitz hat. Für Nutzer in der Europäischen Union ist die Meldung an die zuständige nationale Behörde für Medizinprodukte ihres Landes zu richten. In Deutschland ist die zuständige Behörde das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Treten während der Anwendung Schmerzen, allergische Reaktionen oder andere ungewöhnliche und nicht eindeutig erklärbare Symptome im Zusammenhang mit der Verwendung des Medizinprodukts auf, wenden Sie sich bitte an eine medizinische Fachperson.

Das Produkt darf ausschließlich gemäß seiner vorgesehenen Zweckbestimmung verwendet werden. Eine zweckfremde Nutzung ist untersagt.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Reinigung oder durch Missachtung der in dieser Gebrauchsanweisung enthaltenen Hinweise und Empfehlungen entstehen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigung: Das Produkt ist bei Bedarf mit einem weichen, feuchten Tuch und milden Reinigungsmitteln zu reinigen. Anschließend ist die Oberfläche mit sauberem Wasser abzuwischen und gründlich zu trocknen.

Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger oder große Mengen Wasser, da dies die elektrischen Komponenten beschädigen kann. Die Reinigung darf nur bei Temperaturen über 0 °C erfolgen.

Wartung

Der Scooter erfordert trotz geringer Wartungsanforderungen regelmäßige Kontrollen:

Täglich: Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus, die Funktion der Hupe sowie die Sauberkeit des Akkufachs.

Wöchentlich: Überprüfen Sie die Funktion des Fahrhebels, der Bremse sowie die Stabilität der Räder und Verbindungen.

Monatlich: Kontrollieren Sie den Verschleiß der Reifen sowie die Fahr- und Bremsfunktion.

Periodisch: Prüfen Sie den Zustand der Kabel, Verbindungen sowie aller Konstruktionselemente.

Alle Reparaturen, Einstellungen sowie der Austausch des Akkus dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

LAGERUNG

Das Produkt ist an einem trockenen Ort zu lagern und darf keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden.

ENTSORGUNG

Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist der Scooter gemäß den geltenden lokalen, nationalen und EU-Vorschriften für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) zu entsorgen. Das Gerät darf nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

Der Scooter enthält recycelbare Materialien wie Kunststoffe, elektronische Komponenten und Akkus. Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Akku, da er Stoffe enthält, die eine spezielle Behandlung erfordern (u. a. Lithiumverbindungen). Er muss an geeigneten Sammelstellen abgegeben werden.

Informationen zu den korrekten Entsorgungswegen erhalten Sie bei den lokalen Behörden oder bei einem autorisierten Händler.

Achtung: Eine unsachgemäße Entsorgung kann eine Gefahr für die Umwelt und die menschliche Gesundheit darstellen.

=====

WICHTIGE INFORMATION FÜR UNSERE KUNDEN: GARANTIE UND GEWÄHRLEISTUNG FÜR AKKUS

Liebe Kunden,

wir möchten Ihnen wichtige Informationen zur Garantie und Gewährleistung für die Akkus unserer Produkte geben.

Leider deckt die Garantie keine Verschleißteile wie Akkus ab. Das bedeutet, wenn der Akku an Ihrem Produkt nicht mehr funktioniert, gilt die Garantie nicht.

Aber keine Sorge! Wenn Sie einen defekten Akku haben, können Sie sich auf die Gewährleistung verlassen. Das bedeutet, dass wir die Situation prüfen und gegebenenfalls den Akku ersetzen, wenn Sie den Defekt innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware melden.

Es ist wichtig zu beachten, dass Sie den Defekt so schnell wie möglich melden müssen, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware.

GARANTIEBEDINGUNGEN

Die Garantie deckt folgende Fälle nicht ab:

- Subjektive Wahrnehmungen, die keine funktionellen Probleme darstellen.
- Abnutzung und Alterung (z. B. lackierte Oberflächen, natürliche Verfärbung von Materialien). Fälle, in denen die Garantie erlischt:
- Unregelmäßige Überprüfung der vom Hersteller empfohlenen Punkte.
- Unsachgemäße oder mangelhafte Wartung.
- Nicht bestimmungsgemäße oder übermäßige Nutzung.
- Nicht autorisierte Modifikationen.

- Schäden durch äußere Einflüsse wie Ruß, Chemikalien, Vogelkot, sauren Regen, Steine, Metallstaub.
- Naturkatastrophen wie Taifune, Überschwemmungen, Brände, Erdbeben.
- Nicht von der Garantie abgedeckte Kosten: Austausch von Verschleißteilen wie Akku, Reifen, Sicherungen, Kunststoff- oder Glasteilen, Schmiermitteln.
- Kosten für Inspektionen, Einstellungen, Ölwechsel, Reinigung.
- Kosten für regelmäßige Inspektionen, wie vom Hersteller empfohlen.
- Kosten, die durch nicht autorisierte Reparaturzentren verursacht wurden.

Achtung: Bewahren Sie den Karton des Rollstuhls auf! Dies ist eine Bedingung der Garantie!

GARANTIEKARTE

Modell:

Seriennummer:

Siegel der Verkaufsstelle

und leserliche Unterschrift des Verkäufers

1) Antar Medizin GmbH, Döbelner Str. 2, Aufgang A, 12627 Berlin, gewährt hiermit 12 Monate Garantie für das Produkt ab dem Kaufdatum des Produkts durch den Käufer.

2) Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist die Bundesrepublik Deutschland.

3) Während der Garantiezeit verpflichtet sich ANTAR, Reparaturen, die zur Wiederherstellung des ordnungsgemäßen Funktionierens des Produkts erforderlich sind, innerhalb von 14 Tagen ab dem Datum des Eingangs des Produkts beim Service zusammen mit dem Kaufnachweis und der Garantiekarte durchzuführen. ANTAR behält sich das Recht vor, das Produkt zu ersetzen, falls die Reparaturkosten als nicht rentabel angesehen werden. Mit Reparatur oder Austausch des defekten Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 12 Monaten ab Kaufdatum durch den Käufer.

4) Wenn eine Fehlfunktion des Produkts festgestellt wird, senden Sie es unverzüglich portofrei an die Adresse von ANTAR (unter Punkt 1 angegeben) oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle.

5) Lesen Sie vor Gebrauch die Anleitung sorgfältig durch und befolgen Sie ihre Bestimmungen. Die Verwendung des Produkts entgegen seiner beabsichtigten Verwendung und Empfehlungen führt zu einem unwiderruflichen Verlust der Garantie.

6) Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch äußere mechanische Kräfte, eine Last, die das in der Anleitung beschriebene maximal zulässige Gewicht des Benutzers überschreitet, sowie den Kontakt des Produkts mit Alkohol, Fettstoffen oder Benzin verursacht werden. Die Garantie gilt nicht für Teile, die während des Gebrauchs normalem Verschleiß ausgesetzt sind, wie Lager, Gummielemente und andere.

7) Die Garantie gilt nur mit dem Kaufnachweis (Rechnung, Steuerbeleg, Mehrwertsteuerrechnung). Im Falle einer Reklamation muss der Nachweis beigelegt werden.

8) Reklamationen, die ohne Kaufnachweis und Garantiekarte mit der Seriennummer des Produkts eingereicht wurden, werden nicht berücksichtigt.

9) Der Käufer hat im Falle eines Sachmangels gegenüber dem Verkäufer gesetzliche Rechte, deren Inanspruchnahme unentgeltlich ist. Gegenüber diesen gesetzlichen Rechten enthält die Garantie ein zusätzliches Leistungsversprechen, das über die gesetzlichen Rechte hinausgeht, diese aber nicht ersetzt.

10. Die Garantie umfasst keine Teile und Komponenten, die dem natürlichen Verschleiß unterliegen, wie z. B. Räder, Reifen, Gummiauflagen oder Sicherungen, deren Abnutzung auf den normalen Gebrauch des Produkts zurückzuführen ist. Für Batterien beträgt die Garantiezeit 6 Monate.



ANTAR MEDICAL Sp. z o.o.
03-068 Warszawa, ul. Zawislanska 43
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net

ERSTER KONTAKT: Verteiler:

Antar Medizin GmbH
Döbelner Str. 2, Aufgang A
12627 Berlin
Tel: 030-22011732, Fax: 030-22012821
E-Mail: antarmedizin@antarmedizin.com



ALBO-Healthcare GmbH
Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham

Gebrauchsanweisungsversion: v1-16.04.2026

Ausgabedatum der aktuellen Version der Gebrauchsanweisung 16.04.2026