



BEDIENUNGSANWEISUNG

AT52314

Rollstuhl, elektrisch, für Außenanwendungen



Vorwort.....	3
Hauptkomponenten	4
Inhalt der Verpackung.....	5
Spezifikation.....	6-7
Funktionen der Hauptkomponenten	8-10
Zusammenklappen und Ausklappen	11
Batterie und Aufladen	12-13
Batteriesicherheit und Batterielebensdauer.....	14
Bedienungsanleitung	15
Fehlersuche, Wartung und Entsorgung.....	16-17
Hinweise, Warnungen.....	18
Bestimmung, Indikationen und Kontraindikationen.....	19
Garantie	20

Liebe Anwender,

Vielen Dank, dass Sie sich für AN TAR entschieden haben.

Dieses Handbuch soll Ihnen helfen, Ihren Rollstuhlroller zu bedienen und zu warten. Bitte lesen Sie es und achten Sie auf die notwendigen Informationen, bevor Sie Ihren Rollstuhlroller benutzen. Bei Problemen, die nicht in diesem Handbuch beschrieben sind, oder bei inhaltlichen Fehlern, wenden Sie sich bitte direkt an Antar Sp. J.

Das Handbuch umfasst die Merkmale der wichtigsten Teile, Schlüsselkomponenten, Teilefunktionen, Sicherheitsanforderungen und -anweisungen, Hinweise zur Batterie, zu Notfällen und zur Wartung. Die Symbole werden verwendet, um Ihre Aufmerksamkeit auf Dinge zu lenken, die beachtet werden müssen, und es wird dringend empfohlen, die Anweisungen vollständig zu verstehen.

Dieses Handbuch enthält aktuelle Produktinformationen und Produktbilder. Sie dienen der besseren Verständlichkeit für den Anwender. Der Roller unterliegt einer ständigen Verbesserung und Innovation. Wir behalten uns das Recht vor, verbesserte Produkte ohne Vorankündigung einzuführen, für neue Verbesserungen kontaktieren Sie uns bitte jederzeit.

Wir sind der festen Überzeugung, dass der Roller Ihnen mehr Komfort bietet und Ihnen hilft, Ihr Ziel eines freien Lebens zu erreichen.

Empfehlung

Beachten Sie die "Warnhinweise" in dieser Anleitung, um sich vor Verletzungen zu schützen. Die Nichtbeachtung der "Hinweise" in dieser Anleitung kann zu Schäden am Roller führen.



HAUPTKOMPONENTEN



- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| 1 Tafel mit Steuerungselementen | 5 PU-Vollrad | 8 Dekorative Abdeckung |
| 2 Sitz | 6 Ladeanschluss | 9 Aluminium-Lenksäule |
| 3 Armlehne | 7 Fußstütze und Griff der Batterie | 10 Klemmbügel |
| 4 Kunststoffabdeckung | | |

Detailzeichnung



- | | |
|---|--|
| 1 | Drehknopf für die Geschwindigkeitsregelung |
| 2 | Batteriestromanzeige |
| 3 | Hupe |
| 4 | Schlüsselschalter |
| 5 | USB-Anschluss |
| 6 | Steuerhebel der Fahrtrichtung |

INHALT DES VERPACKUNG

Nachdem Sie Ihren Roller erhalten, öffnen Sie die Verpackung und überprüfen Sie, ob sich die folgenden Gegenstände darin befinden:



SPEZIFIKATION

Größe im ausgeklappten Zustand	Länge 1050 Breite 550 Höhe 870 mm
Größe nach dem Zusammenklappen	Länge 480 Breite 550 Höhe 790 mm
Verpackungsgröße	Länge 580 Breite 530 Höhe 850 mm
Vorderrad	7" × 2" Vollrad
Hinterrad	8" × 2" Vollrad
Maximale Geschwindigkeit	0-6 km (3,7 mph)
Gradient	0 – 6°
Wenderadius	1200 mm
Gewicht mit Batterie	29 kg
Gewicht ohne Batterie	26,6 kg
Gewicht der Batterie	2,4 kg
Bremssystem	Intelligent, regenerativ und elektromagnetisch
Max. Fahrstrecke	20 km mit einer einzigen Ladung
Antriebssystem	Hinterradantrieb
Fähigkeit, Hindernisse zu überwinden	40 mm
Max. Tragkraft	120 kg
Bodenfreiheit	50 mm
Sitzhöhe	560 mm über dem Boden
Motor	24 V 180 W
Ladegerät der Batterie	24 V 6 AH für Lithium-Batterie (zwei Batterien)
Steuergerät	PG 45A
Ladegerät der Batterie	DC 24 V / 2 A

SPEZIFIKATION

Bremsweg	3,01 m bei einer Geschwindigkeit von 3,56 m/s
Bremszeit	1s
Alarmsignal	Summer
Ladezeit	6 Stunden
Variable Geschwindigkeit	Spannungsgesteuerte Geschwindigkeit
Abnehmbar und zusammenklappbar	Klappbarer Sitz, abnehmbare Batterie
Ladestrom	2 A
Maximale sichere Arbeitsneigung nach hinten	20,1°
Maximale sichere Arbeitsneigung nach vorne	30°
Maximale sichere Arbeitsneigung seitwärts	15,3°
Lichte Weite	60 mm
Nutzfläche und Umgebung	Außen- und Innenanwendungen



FUNKTIONEN DER HAUPTKOMPONENTEN

Lenkstangengruppe

Lenkstangengruppe inklusive Bedienfeld (mit Batterieladezustandsanzeige und Schlüsselschalter, Geschwindigkeitseinstellknopf und Hupe), Lenkrad, Richtungssteuerhebel. Die wichtigsten Hilfsfunktionen sind voreingestellt.



Bedienfeld



Netzschalter

Information Die Umgebungsfeuchtigkeit hat einen erheblichen Einfluss auf den Betrieb der Hauptkomponenten. Es wird dringend empfohlen, sich vor oder während des Betriebs in einer Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit aufzuhalten.

Der USB-Anschluss wird nur zum Laden des Mobiltelefons verwendet.

Netzschalter

- a. Der Strom wird eingeschaltet, wenn Sie den Schlüsselschalter nach rechts drehen, danach ist der Roller fahrbereit.
- b. Der Strom wird ausschaltet, wenn der Schlüsselschalter nach links drehen, danach kann der Roller nicht mehr bedient werden. Wenn Sie die Fahrt beendet haben, schalten Sie das Gerät mit dem Schlüssel aus.



Warnung Wenn der Strom während des Betriebs ausgeschaltet wird, wird der Roller plötzlich und sofort durch das elektromagnetische Bremssystem gestoppt.

Geschwindigkeitsregler



Die Geschwindigkeitseinstellung erfolgt durch Kippen des Geschwindigkeitsreglers mit dem Finger und reicht von 0 km/h bis 6 km/h nach eigenem Ermessen. Drehen Sie den Knopf so weit wie möglich nach links für sehr niedrige Geschwindigkeit und so weit wie möglich nach rechts für hohe Geschwindigkeit.

Warnung Halten Sie aus Sicherheitsgründen beim Wenden oder Rückwärtsfahren immer eine niedrigere Geschwindigkeit ein.

FUNKTIONEN DER HAUPTKOMPONENTEN

Display

Der Ladezustand der Batterie wird beim Einschalten auf dem Display angezeigt.

Bedienfeld



Steuerhebel für die Fahrtrichtung



Die Vorwärts- und Rückwärtsfahren wird über den Steuerhebel gesteuert.

- a. Halten Sie das Lenkrad sanft mit beiden Händen fest.
- b. Der Roller fährt vorwärts, wenn Sie den Hebel auf der rechten Seite mit den Fingern ziehen.
- c. Der Roller fährt rückwärts, wenn Sie den Hebel auf der linken Seite mit den Fingern ziehen.
- d. Beim Rückwärtsfahren wird ein akustisches Signal ausgegeben.
- e. Der Bedienhebel bewegt sich beim Loslassen automatisch in die Mittelstellung und gleichzeitig wird die Bremse betätigt.

Hupe

Wenn die Hupe gedrückt wird, ertönt ein Signalton. Die Hupe sollte unter Umständen, die sie während der Fahrt erfordern, rechtzeitig betätigt werden.



Teleskopisches Lenkrad

Ziehen Sie die Kunststoffklemme hoch, um die Länge des Lenkers einzustellen, drücken Sie die Klemme bei der gewünschten Länge ein.



FUNKTIONEN DER HAUPTKOMPONENTEN

Steuergerät

Die Steuerung befindet sich unter der hinteren Abdeckung und leitet das Signal vom Bedienfeld an den Motor, die Bremse und die Nabe weiter.

Information Bewahren Sie das Steuergerät in einer Umgebung mit geringer Luftfeuchtigkeit auf und stellen Sie sicher, dass das Steuergerät vor dem Betrieb trocken ist.

Schalthebel für elektrischen und manuellen Betrieb

Die Handbremse kann durch Umschalten des Bedienhebels in den manuellen oder elektrischen Modus ein- und ausgeschaltet werden.

Elektrische Steuerung

Ziehen Sie den Hebel zurück in die OFF-Position, um auf elektrische Steuerung umzuschalten

Manuelle Steuerung

Drücken Sie den Hebel nach vorne in die ON-Position, um auf manuelle Steuerung umzuschalten



Fernsteuerung



Zusammenklappen



und Ausklappen

ZUSAMMENKLAPPEN UND AUFKLAPPEN

Der Roller ist so konzipiert, dass Sie ihn auf 3 Arten zusammen- und ausklappen können und zwar je nach Vorlieben und Umständen. Sie können zwischen Automatikbetrieb, elektrischem Schalter und Handbetrieb wählen, bitte beachten Sie die unten stehenden Anweisungen für diese 3 Methoden.

Automatisches Zusammenklappen und

Ausklappen

Automatisches

Zusammenklappen

- A. Drücken und halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- B. Der Roller wird automatisch zusammenklappen.
- C. Lassen Sie den Taster los,  wenn der Roller vollständig zusammengeklappt ist.

Automatisches Ausklappen

- A. Drücken und halten Sie die Taste  auf der Fernbedienung.
- B. Der Roller wird automatisch ausgeklappt.
- C. Lassen Sie die Taste los,  wenn der Roller ausgeklappt ist.



Elektrischer Schalter zum Aus- und Zusammenklappen

Schalter zur Bedienung von Ausklappen und Zusammenklappen. Dieser Schalter befindet sich auf der Rückseite des Rollers.



Hinweis Die rein manuelle Ausführung des Rollers verfügt nicht über Funktionen zum Aus- bzw. Zusammenklappen mittels Fernbedienung oder Drucktasten. In diesem Fall klappen Sie den Roller immer von Hand auf und zusammen.

BATTERIE UND LADEN

Der Roller ist für einen wartungsfreien Betrieb und eine lange Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterie ausgelegt. Die Batterie kann mit einem Ladegerät 24 V/2 A geladen werden.

- Laden Sie mindestens einmal alle 3 Monate nach.
- Laden Sie die Batterie vollständig auf und trennen Sie sie vom Roller, wenn Sie ihn nicht über einen längeren Zeitraum benutzen wollen.

Ladevorgang der Batterie:

1. Versorgung des Rollers ausschalten. Öffnen Sie die Abdeckung des Ladegeräts und stecken Sie dann den Stecker des Ladegeräts in den Ladeanschluss des Rollers.



Wippschalter oder Schlüsselschalter ausschalten.



Hinweis

Um eine Überladung zu vermeiden, laden Sie das Gerät nicht länger als

6 Stunden über den Ladeanschluss des Controllers, wenn zwei Batterien installiert sind. Laden Sie niemals länger als 3 Stunden, wenn nur eine Batterie installiert ist.



Öffnen Sie dann den hintere Ladeanschluss und stecken Sie den Stecker ein.

Warnung Stellen Sie sicher, dass der Stecker des Ladegeräts vollständig mit dem Ladeanschluss des Rollers verbunden ist.

2. Schließen Sie den Netzstecker des Ladegeräts an eine Stromquelle in Ihrer Wohnung an. Überprüfen Sie die LEDs am Ladegerät. Eine orangefarbene LED bedeutet, dass der Ladevorgang läuft, während eine grüne LED bedeutet, dass das Gerät vollständig geladen ist.
3. Schalten Sie das Netzladegerät aus, wenn die Batterie vollständig geladen ist. Trennen Sie die AC-Stromquelle, bevor Sie den DC-Ladestecker abziehen.

Warnung Trennen Sie die Netzstromquelle, nachdem die Batterie vollständig geladen ist, um eine längere Lebensdauer der Lithium-Ionen-Batterie zu gewährleisten.

4. Die rote LED am Ladegerät erlischt, wenn die Stromquelle und das Ladegerät eingeschaltet sind. Prüfen Sie, ob der Stromanschluss richtig eingestellt ist.
5. Die Zeit zum vollständigen Laden jeder Batterie beträgt 3 Stunden.

Direktes Laden der Batterie Die Batterie kann direkt über die Stromquelle zu Hause geladen werden. Schließen Sie dazu die Batterieklemmen an die Stromquelle an, danach kann der Ladevorgang beginnen.



Hinweis

Bei der direkten Ladung einer einzelnen Batterie außerhalb des Rollers stellen Sie sicher, dass die Ladezeit weniger als 3 Stunden dauert, um eine Überladung zu vermeiden.



Hinweis Trennen Sie das Ladegerät sofort von der Stromquelle, sobald die Anzeige am Ladegerät grün wird.

BATTERIE UND LADEN

Einige Informationen zum Laden der Batterie über das Ladegerät

Großer Eingangsstrom vom Ladegerät zur Batterie, wenn die Batterie schwach ist, kleiner Strom vom Ladegerät, wenn die Batterie fast voll geladen ist. Nahezu kein oder nur ein geringer Strom wird an die Batterie angelegt, so dass eine kontinuierliche Ladung nicht zu einer Überladung führt, aber eine Ladezeit von nicht mehr als 6 Stunden wird empfohlen. Die Batterie wird kontinuierlich geladen, wenn sie an das Ladegerät angeschlossen ist.

Anzeige der Ladedioden

Es gibt zwei LEDs auf dem Ladegerät, die rote zeigt den Stromanschluss an, die andere zeigt den Ladestatus an, deren orange Farbe den Ladevorgang und die grüne Farbe den vollen Ladestatus anzeigt. Wenn das rote Licht nach dem Trennen der Stromquelle immer noch leuchtet, kann dies auf einen Fehler oder eine Fehlfunktion hinweisen. Normalerweise erlischt das rote Licht einige Sekunden nach dem Trennen der Stromquelle. Diese Art des Erlöschens des Lichts ist normal, wenn die Batteriespannung hoch ist.

Ein anderer Typ von Ladegerät

Das Ladegerät ist zum Laden der Roller-Batterie bestimmt. Wir empfehlen Ihnen dringend, kein anderes Ladegerät zu verwenden, nicht-originale Ladegeräte und Teile sind verboten.

Ladefrequenz

Die Ladefrequenz hängt von folgenden Bedingungen ab:

- A. Ganztägige Fahrten mit dem Roller
- B. Gelegentliche Fahrten mit dem Roller

Sicheres und zuverlässiges Laden der Batterie

- A. Laden Sie nicht 6 Stunden lang ununterbrochen über den Ladeanschluss des Steuergeräts, um eine Überladung bei zwei eingelegten Batterien zu vermeiden. Laden Sie niemals länger als 3 Stunden mit nur einer eingelegten Batterie.
- B. Wenn Sie eine einzelne Batterie außerhalb des Rollers direkt aufladen, stellen Sie sicher, dass Sie sie weniger als 3 Stunden lang aufladen, um eine Überladung zu vermeiden.
- C. Trennen Sie dann das Ladegerät sofort von der Stromquelle, sobald die Anzeige am Ladegerät grün wird.
- D. Laden Sie den Roller einmal pro Woche auf, wenn er nur einmal pro Woche benutzt wird. Eine vollständige Aufladung dauert 6 Stunden.
- E. Halten Sie die Batterie vollständig geladen.

So erreichen Sie die maximale Fahrstrecke

- A. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vor der Fahrt vollständig geladen ist
- B. Halten Sie sich von Hügeln, Makadam-Wegen und weichem Gelände fern.
- C. Nehmen Sie nur die Dinge mit, die Sie benötigen, reduzieren Sie die Belastung des Rollers.
- D. Fahren Sie gleichmäßig, ohne Pausen oder Sprünge. Geeignete Batteriespezifikation Lithium-Ionen-Batterie mit der angegebenen Spezifikation.

Warnung Nehmen Sie die Batterie nicht selbst heraus. Gießen Sie kein Wasser auf die Batterie. Bei unsachgemäßem Gebrauch der Batterie, der zu einer Beschädigung der Batterie führt, erlischt die Garantie.

BATTERIESICHERHEIT UND HINWEISE ZUR LEBENSDAUER

Ursache für schlechte Leistung bei einer neuen Batterie

Der Roller verwendet eine Tiefentladungsbatterie mit spezieller chemischer Technologie, die ein schnelles Aufladen der Batterie für eine längere Nutzung nach einer vollen Ladung ermöglicht. Die mitgelieferte Batterie ist voll aufgeladen, die anfängliche Leistung verringert sich jedoch während des Transports, z. B. durch Temperaturschwankungen.

Hohe Temperaturen führen dazu, dass die Batterie an Leistung verliert, und niedrige Temperaturen führen zu längeren Ladezeiten. Es dauert einige Tage, um sich an die Umgebung anzupassen und nach dem Transport wieder den normalen Betrieb aufzunehmen. Die Batterie stabilisiert ihre Parameter nach einigen Tagen und einigen Lade- und Entladezyklen.

Schritte zur Verbesserung der Batterieleistung

- A. Laden Sie die Batterie im Neuzustand immer vollständig auf, um sicherzustellen, dass sie zu mindestens zu 88 % geladen ist.
- B. Laden Sie die Batterie nach dem Gebrauch immer vollständig auf und fahren Sie mit dem Roller an sichere und vertraute Orte. Wenn Sie den Roller zum ersten Mal benutzen, halten Sie eine niedrige Geschwindigkeit ein.
- C. Laden Sie die Batterie nach der zweiten Fahrt vollständig auf, wodurch sich ihre Kapazität auf 90 % erhöht.
- D. Nach 4~5 Fahrten mit einer vollen Ladung erreicht die Leistung des Rollers 100%.

Sicherstellung der Batterielebensdauer

Das vollständige Aufladen der Batterie erhält die Leistung und Lebensdauer für eine lange Zeit, während Überladen und unregelmäßiges Aufladen zu Schäden der Batterie führen.

Lagerung des Rollers und der Batterie

Wenn Sie Ihren Roller über einen längeren Zeitraum nicht benutzen, beachten Sie bitte die Lagerungshinweise

- A. Laden Sie die Batterie bis zur vollen Kapazität auf
- B. Klemmen Sie die Batterie ab
- C. Lagern Sie den Roller an einem trockenen Ort bei einer geeigneten Temperatur
- D. Vermeiden Sie plötzliche Temperaturschwankungen bei der Lagerung

Warnung Wenn die Batterie eingefroren ist, lagern Sie sie mehrere Tage an einem warmen Ort

Wenn Sie Ihren Roller für längere Zeit einlagern, empfiehlt es sich, eine Matte unter die Fußstützenplatte zu legen, um zu vermeiden, dass die Reifen nach längerer Zeit des Bodendrucks verschmutzt werden.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vor der Verwendung

- A. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig geladen ist.
- B. Machen Sie sich mit der Strecke vertraut, die Sie fahren wollen, auch mit dem Vorhandensein von Menschenmassen, Tieren und möglichen Hindernissen.
- C. Halten Sie sich stets von unebenem und löchrigem Gelände fern.
- D. Prüfen Sie, ob der Bremshebel vollständig eingeführt ist und der Bremshebelschalter gedrückt ist.
- E. Lenken Sie mit beiden Händen, indem Sie sie auf dem Lenkrad halten.
- F. Verwenden Sie die Hupe, um zu sehen, ob sie funktioniert.

Fahren

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, wenn Sie mit Ihrem Roller fahren:

- A. Klappen Sie den Roller vollständig aus.
- B. Prüfen Sie, ob der Sitz in der richtigen Position ist und stellen Sie dessen Neigung bequem ein.
- C. Schalten Sie den Strom ein, wenn der Sitz richtig eingestellt ist und Sie die Hände am Lenkrad haben.
- D. Drücken Sie mit dem rechten Daumen leicht auf den Richtungssteuerungshebel.
- E. Die Bremse löst sich automatisch und der Roller fährt vorwärts. Drücken Sie den Steuerhebel nicht plötzlich zu stark, da dies zu einem starken Anstieg der Geschwindigkeit führt.
- F. Drehen Sie das Lenkrad nach links, um nach links zu fahren.
- G. Drehen Sie das Lenkrad nach rechts, um nach rechts zu fahren.
- H. Der Roller fährt geradeaus, wenn sich der Lenker in der Mittelstellung befindet.
- I. Die Bremse fällt automatisch ein, wenn sich der Steuerhebel in der Mittelstellung befindet und der Roller angehalten wird.

Ende der Fahrt

- A. Stellen Sie sicher, dass der Roller vollständig zum Stillstand gebracht wird.
- B. Schalten Sie den Strom mit dem Schlüssel aus oder drehen Sie den Wippschalter in die Position "O".
- C. Steigen Sie vorsichtig vom Roller ab.
- D. Klappen Sie den Roller auf eine von 2 möglichen Arten - über die Fernbedienung oder den elektrischen Schalter - zusammen.

Transport in einem Fahrzeug

WARNUNG:

Verletzungsgefahr - Während des Transports sollten sich keine Personen oder Gegenstände unter dem Rollstuhl befinden.

WARNUNG:

Verletzungsgefahr - stellen Sie sicher, dass der Rollstuhl richtig gesichert ist. Dadurch werden Verletzungen der Fahrgäste bei einem Aufprall oder einer plötzlichen Bremsung vermieden. Prüfen Sie, ob der Rollstuhl nur an den festen Teilen des Rahmens befestigt ist.

FEHLERSUCHE UND WARTUNG



Das Steuergerät enthält Programme zur Erkennung von Problemstellen und zur Fehlersuche. Wenn die Diagnose Probleme und Fehler erkennt. Die LED blinkt, bis der Fehler behoben ist. Beispiel: Die Anzahl der Blitze ist "1-9". Benutzer können versuchen, die Fehler wie unten beschrieben zu beheben.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an uns oder unseren Vertreter.

Anzahl der Blitze	Beschreibung der Fehlfunktion	Mögliche Ursache
1	Niedrige Batteriespannung oder Problem mit dem Batterieanschluss	Überprüfen Sie den Batterieanschluss. Wenn es kein Problem mit dem Anschluss gibt, versuchen Sie, die Batterie zu laden.
2	Es gibt ein Problem mit Motoranschluss	Prüfen Sie alle Verbindungen zwischen dem Motor und dem Steuergerät
7	Versagen des Richtungssteuerungshebels	Vergewissern Sie sich, dass die Richtungssteuerungshebel in der Parkposition stehen, bevor Sie den Roller einschalten.
9	Ausfall des Bremshebels	Überprüfen Sie die Verbindung zwischen dem Bremshebel und dem Motor, um sicherzustellen, dass das Steuergerät sicher angeschlossen ist.

Unzureichende Batteriekapazität oder Leistungsver schlechterung

Das Problem der Batteriekapazität oder Leistungsver schlechterung kann in den meisten Fällen wie folgt gelöst werden:

- A. Prüfen Sie, ob der Schlüssel vollständig eingesteckt ist und sich in der Position ON befindet.
- B. Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig geladen ist.
- C. Erhöhen Sie die Zyklus- und Ladezeit, wenn die Batteriekapazität abnimmt.
- D. Nachdem die oben genannten Schritte ohne jegliche Verbesserung durchgeführt wurden, ist ein Batteriekapazitätstest erforderlich.

Obwohl der Roller für einen wartungsfreien Betrieb ausgelegt ist, sollte er kontrolliert und gepflegt werden.

Anschließen der Batterie

- A. Prüfen Sie die Batterie auf Korrosion und korrekten Anschluss.
- B. Achten Sie darauf, dass die Batterie flach in der Batteriehalterung liegt.
- C. Beschädigungen an den Anschlüssen müssen repariert oder durch neue Teile ersetzt werden.

Kunststoffabdeckung

Verwenden Sie niemals Öl oder Chemikalien, um die Kunststoffabdeckung des Rollers zu reinigen, und waschen Sie den Roller nicht mit Wasser, um eine Beschädigung der elektrischen Komponenten zu vermeiden.

Lager, Motor und Getriebe

- A. Diese Komponenten wurden während des Herstellungsprozesses geschmiert und versiegelt und benötigen nach dem Kauf keine weitere Schmierung.
- B. Halten Sie elektrische Komponenten stets trocken, insbesondere das Bedienfeld, das Ladegerät und alle elektrischen Teile.
- C. Trocknen Sie vor der Fahrt mit dem Roller alle nass gewordenen Teile ab.

Entsorgung

Elektroschrott, bitte entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden allgemeinen Entsorgungsbedingungen.

HINWEISE UND WARNUNGEN

ALLGEMEINE WARNUNG

Verwenden Sie das Produkt nicht, bevor Sie dieses Handbuch gelesen und verstanden haben. Wenn Sie die Warnungen, Vorsichtshinweise oder Anweisungen nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihr medizinisches Fachpersonal oder Ihren Händler, um Produktschäden zu vermeiden.

HINWEIS: Überprüfen Sie alle Teile auf Transportschäden. Wenn Sie solche Schäden feststellen, verwenden Sie das Produkt NICHT. Weitere Informationen erhalten Sie vom Hersteller.

HINWEIS: Jeder schwerwiegende Vorfall mit einem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Anwender oder Patient wohnt, gemeldet werden.

HINWEIS: Bei unsachgemäßer Verwendung des Produkts besteht Kippgefahr. Bitte beachten Sie die Hinweise zum Einsteigen/Absteigen/Fahren.

WARNUNG:

Kippgefahr - reduzieren Sie die Geschwindigkeit vor dem Einfahren in eine Kurve oder einen Bogen.

WARNUNG:

Quetschgefahr - halten Sie immer einen ausreichenden Abstand zu Kurven und Hindernissen.

WARNUNG:

Verletzungsgefahr - Seien Sie vorsichtig, wenn Sie mit einem Roller mit Vorderradantrieb fahren, da das Heck des Rollers bei Kurvenfahrten kippen kann.

WARNUNG:

Begrenzen Sie Ihre Geschwindigkeit - bewegen Sie sich auf geeigneten Flächen so langsam wie möglich.

WARNUNG:

Kehren Sie nicht bergauf zurück.

WARNUNG:

Kippgefahr - bei Bergauf- und Bergabfahrten äußerste Vorsicht walten lassen.

WARNUNG:

Verletzungsgefahr - Wählen Sie geeignete Fahrwege, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.

WARNUNG:

Achten Sie beim Bewegen des Rollstuhls durch Türöffnungen und andere Durchgänge darauf, dass auf beiden Seiten genügend Platz ist, damit Sie sich nicht die Hände verletzen oder den Rollstuhl beschädigen.

WARNUNG:

Überschreiten Sie niemals die maximale Belastung.

WARNUNG:

Tragen Sie für eine bessere Sichtbarkeit beim Fahren in der Dunkelheit helle Kleidung oder Kleidung mit reflektierenden Elementen, um besser gesehen zu werden.

HINWEIS:

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nachlässige Wartung, unsachgemäße Instandhaltung oder Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.

BESTIMMUNG, INDIKATIONEN UND KONTRAINDIKATIONEN

Bestimmung

Das Produkt ist für den komfortablen Transport von Personen mit eingeschränkter oder fehlender Gehfähigkeit konzipiert. Der Rollstuhlroller ist für den Transport einer Person ausgelegt.

Indikationen

- Lähmung
- Verlust von Gliedmaßen (Beinamputation)
- Beschädigung oder Verformung von Gliedmaßen
- steife oder beschädigte Gelenke
- Herzinsuffizienz und schlechte Durchblutung
- Gleichgewichtsstörungen
- Kachexie (Verlust von Muskelmasse)

Kontraindikationen

Körperliche oder geistige Einschränkungen (z. B. Sehbehinderung), die einen sicheren Umgang mit dem Rollstuhl verhindern.

HINWEIS:

Die Benutzung eines Mobiltelefons ist während der Fahrt nicht erlaubt.

GARANTIE

Der Käufer dieses Produkts hat Anspruch auf die von unserem Unternehmen und seinen Tochtergesellschaften angebotene beschränkte Garantie für die folgenden Komponenten und in folgenden Garantiefristen:

- Sitzrahmen: 3 Jahre
- Motoren: 1 Jahr
- Steuergerät und Prozessor: 1 Jahr
- Batterie: 6 Monate
- Verschleißteile: 3 Monate

Inklusive Reifen, Sitz und Rücken, Armlehnen, Haltegurte.

Diese Garantie gilt nur für den Ersatz von defekten Teilen. Alle Teile, die unter die Garantie fallen, werden ersetzt und direkt zu Ihnen nach Hause geliefert. Etwaige Servicekosten und Arbeitsstunden für Ersatzteile im Rahmen der Garantie müssen vom Benutzer getragen werden.

Aufgrund des einfachen Aufbaus können die meisten Teile leicht vom Endanwender ausgetauscht werden, ohne dass ein professioneller Service erforderlich ist. Es ist jedoch immer ratsam, professionelle Unterstützung bei der Wartung und Instandhaltung in Anspruch zu nehmen, um die korrekte Ausführung der Arbeiten sicherzustellen.

Von der Garantie sind ausgeschlossen:

1. Produkte, die durch Fahrlässigkeit des Benutzers beschädigt wurden.
2. Versehentlich beschädigte Produkte.
3. Absichtlich beschädigte Produkte.
4. Produkte, die der Fahrlässigkeit unterlagen.
5. Produkte, die missbraucht wurden.
6. Produkte, die unsachgemäß gelagert wurden.
7. Produkte, die unsachgemäß gehandhabt wurden.
8. Produkte, die unsachgemäß verwendet wurden.
9. Unsachgemäß verwendete Produkte.
10. Produkte, die auf nicht autorisierte, nicht zugelassene Weise verändert wurden.

Die Garantie ist nicht übertragbar und gilt nur für den Erstkäufer des Produkts.



ANTAR Sp. J.
03-068 Warszawa, ul. Zawiślańska 43,
Polen
Tel. 22 518 36 00, Fax 22 518 36 30
www.antar.net E-Mail: antar@antar.net